

120X170 mm

**PowerZoom
MAX**

005365

Merci d'avoir choisi les lunettes grossissantes Power Zoom Max. Grâce à leur **effet loupe**, **160 %** elles vous permettent de voir avec précision sans vous fatiguer la vue.

Les lunettes Power Zoom Max permettent un **grossissement de 160 %** des objets sans distorsion, et vous fournissent un éclairage mains libres. Grâce à leur champ de vision à 120 degrés, tout vous semblera plus lumineux, plus net et plus grand.


AVERTISSEMENTS :

- **NE PAS** utiliser les lunettes Power Zoom Max comme lunettes de protection.
- **NE PAS** observer le soleil avec les lunettes Power Zoom Max. Observer le soleil ou ses alentours causerait des dommages immédiats et irréversibles à vos yeux.
- **NE PAS** fixer d'ampoules LED. Cela risquerait d'entraîner une déficience visuelle.
- **NE PAS** se déplacer en portant les lunettes Power Zoom Max.
- **NE PAS** conduire en portant les lunettes Power Zoom Max.
- **NE PAS** utiliser de solvants ou d'alcool pour nettoyer les lunettes Power Zoom Max.


ATTENTION : Lunettes réservées à la vision de près. Ces lunettes prêtes à l'emploi, disponibles sans ordonnance, ne sauraient se substituer à la prescription de lunettes de vue ou à un examen chez l'ophtalmologiste. Seul un examen régulier effectué par un professionnel de la vue permet de déterminer vos besoins visuels et de contrôler votre santé oculaire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Pour éliminer les saletés et les traces de doigts, utiliser le chiffon de nettoyage en microfibre (fourni) ou un chiffon doux spécial verres optiques. Pour les verres très sales, utiliser de l'eau ou un savon neutre. **NE PAS** forcer lors du nettoyage ; cela risquerait de rayer les verres.

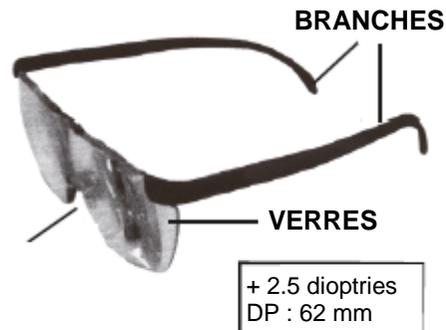

COMPARTIMENT À PILES

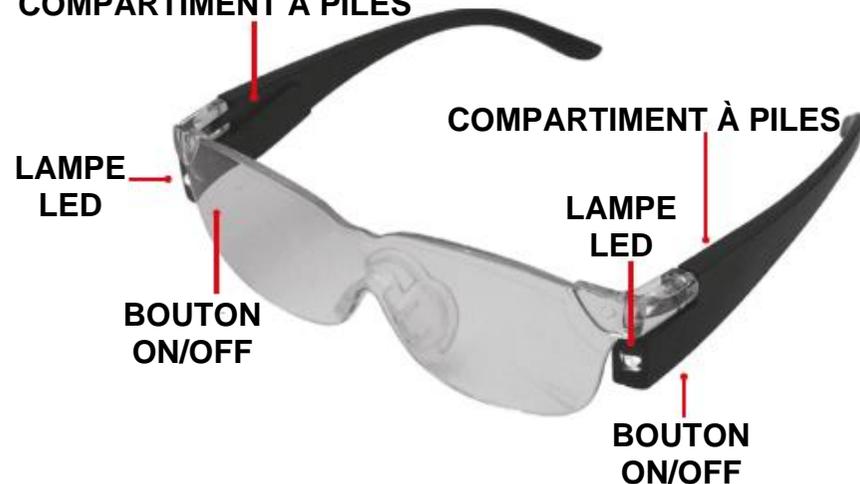

Comment changer les piles

CONSIGNES D'UTILISATION :

Les lunettes Power Zoom Max sont faciles d'utilisation. Elles peuvent être portées seules, ou en complément de vos lunettes de vue ou lentilles de contact. Elles doivent être portées au bout du nez, et NON dans la même position que des lunettes classiques. Appuyez sur le **BOUTON ON/ OFF** situé au niveau de chaque temple pour allumer la lumière.

• Port en complément d'autres lunettes :

Lorsque vous portez des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, laissez un espace entre les lunettes Power Zoom Max et vos autres lunettes afin de trouver la distance focale qui vous convient le mieux.

PORT INCORRECT



PORT CORRECT



Trouver la distance focale idéale :

Tenez un objet à 30 ou 40 cm de vos lunettes Zoom Max, jusqu'à ce que vous trouviez la distance vous permettant de travailler confortablement.





**BOUTON
ON/OFF**

*** Pour les piles de rechange**

Spécifications des piles :

4 piles par paire de lunette Power Zoom Max

Modèle : bouton cell CR1220

Type : Li-Mn, <0,3g Li

Tension : 3,0V

Capacité : 38mAh



Ne pas mettre les déchets de produits électriques au rebus avec les ordures ménagères. Procédez à leur recyclage en les déposant dans des collecteurs adaptés, en déchetterie ou sur le lieu de vente.

Importé par
TELEMARKETING EXPRESS S.L.
Carrer Pau Claris 190, 1, 1
08037 Barcelone – Espagne



Paire de lunette de soleil style aviator

Catégorie 3, UV 400



Avertissements

- Ne regardez pas le soleil directement
- Verres non indiqués pour conduire au lever et à la tombée du jour ainsi que la nuit
- Protection efficace contre les reflets du soleil
- Lunettes conçues pour un usage courant, à la lumière du jour
- Ne pas utiliser comme protection contre les lumières artificielles, comme la lumière des lits de bronzage.

Nettoyage

- Nettoyage avec un chiffon doux pour ne pas rayer les verres.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou de l'eau bouillante.
- Ranger dans son étui de protection après utilisation.

Conformes aux normes européennes :

EN ISO 12312-1 :2013 + EN ISO 12311 :2013



Contenu de la boîte :

- 2 paires de lunettes grossissantes Power Zoom Max + 8 piles incluses
- 2 étuis en microfibre
- 1 paire de lunettes de soleil
- 1 étui de protection